

## Gebrauchsinformation

### Kühlender Stütz- und Entlastungsverband

**Aktimed WRAP<sup>+</sup>** ist ein feuchter, kühlender, halbstarrer Stütz- und Entlastungsverband aus der Gruppe der Zinkleimverbände. Die Rezeptur enthält u.a. ein Hydrokolloidgel, in das Arnika montana 10<sup>-6</sup>, Rhus toxicodendron 10<sup>-8</sup> und Ruta graveolens 10<sup>-6</sup> eingelagert sind. Die physikalische / mechanische Hauptwirkung des Verbandes wird durch die Rezeptur unterstützt. Die Rezeptur ist frei von Fetten wie z. B. Vaseline, Paraffine und hypoallergen sowie latexfrei.

**Aktimed WRAP<sup>+</sup>** kann als Kompressionsverband bei Sportverletzungen, in der Orthopädie und der Traumatologie eingesetzt werden, z.B. bei:

- Luxationen, Kontusionen, Distorsionen, Muskelfaserrisse
- Behandlung von Ödemen nach Weichteilverletzung der Extremitäten
- Bandläsionen, Zerrungen, Achillodynien
- Abbau posttraumatischer Ödeme
- Nachbehandlung von Frakturen und Luxationen nach Gipsruhigstellung

Der Verband darf bei offenen Wunden nur in Kombination mit und über einer sterilen Wundauflage verwendet werden.

#### **Anwendungshinweise:**

Offene Wunden / Hautareale müssen zuerst mit einer sterilen Wundauflage abgedeckt werden.

**Aktimed WRAP<sup>+</sup>** sollte mit leichtem Zug angelegt werden. Bei 3 bis 4 Lagen übereinander hält die angenehm kühlende Wirkung mehrere Stunden an. Eine kohäsive Binde über dem Verband schützt vor Verschmutzung der Kleidung. Der Verband trocknet innerhalb von ca. 4 bis 5 Stunden aus, bildet dann eine stabile, komprimierende Schale und kann bis zu 6 Tage angelegt bleiben.

#### **Sicherheitshinweise:**

Nicht auf offenen Wunden / Hautarealen verwenden.

Nicht bei peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten, Venenentzündungen (septische Phlebitis), tiefen Beinvenenthrombosen (Phlegmasia coerulea dolens), bei Herzinsuffizienz, über superfiziertem Wunden oder bei Diabetes anwenden.

Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Phenoxyethanol) nicht verwenden.

Bei Auftreten von Juckreiz, anhaltender Hautrötung oder Blasenbildung sollte die Behandlung unterbrochen und der behandelnde Arzt konsultiert werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### **Lagerungshinweise:**

**Aktimed WRAP<sup>+</sup>** sollte bei Temperaturen bis max. 35° C gelagert werden. Bei Lagerung an einem kühlen Ort kann die kühlende Wirkung des Verbandes verbessert werden.

**Aktimed WRAP<sup>+</sup>** sollte liegend gelagert werden.

#### **Zusammensetzung:**

Gewebe: Zellwolle, Polyamid

Rezeptur: Zinkoxid, Wasser, Glycerin, Hydrokolloidgel, Arnika montana (Verdünnungsstufe 10<sup>-6</sup>), Rhus toxicodendron (Verdünnungsstufe 10<sup>-8</sup>) und Ruta graveolens (Verdünnungsstufe 10<sup>-6</sup>), Phenoxyethanol, Dextrin

CE: Konform gemäß EU Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Produktion: Deutschland

Stand 07/2018

Aktimed GmbH, Theaterstrasse 18, 69117 Heidelberg