

Gebrauchsinformation Kühlender pflegender Verband

Aktimed derma relief⁺ ist ein kühlender, feuchter und pflegender Verband aus der Gruppe der Zinkleimverbände. Die Rezeptur enthält u.a. ein Hydrokolloidgel, in das ein Calciumalginat und Cardiospermum 10⁻⁶ eingelagert sind. Die physikalische / mechanische Hauptwirkung des Verbandes wird durch die Rezeptur unterstützt. Die Rezeptur ist frei von Fetten wie z. B. Vaseline, Paraffine und hypoallergen sowie latexfrei.

Aktimed derma relief⁺ kann als Kompressionsverband in der Dermatologie eingesetzt werden, z.B. bei:

- Hautjuckreiz,
- Hautbrennen,
- trockener, rissiger Haut und
- bei Dermatitis atopica (Neurodermitis).

Der Verband darf bei offenen Wunden nur in Kombination mit und über einer sterilen Wundauflage verwendet werden.

Anwendungshinweise:

Offene Wunden / Hautareale müssen zuerst mit einer sterilen Wundauflage abgedeckt werden. Der Verband sollte ohne bzw. nur mit leichtem Zug angelegt werden. Bei ca. 3 bis 4 Lagen übereinander hält die kühlende Wirkung für ca. 3 bis 4 Stunden an.

Die Hauttemperatur wird physiologisch durch Verdunstung des Wassers reduziert. Das Zusammenspiel von Feuchtigkeit, Kühlung und dem Hydrokolloidgel unterdrückt den Juckreiz und pflegt die Haut. Eine Schutzbinde über dem Verband schützt vor Verschmutzung. Eine Verlängerung der kühlenden Wirkung kann durch Befeuchten des Verbandes erzielt werden.

Der Verband kann Feuchtigkeit (z. B. Schweiß) aufnehmen und über die Oberfläche wieder abgeben. Mazerationen müssen nicht befürchtet werden, da das Calciumalginathaltige Gel Feuchtigkeit z. B. Wundexsudat aufsaugt. Ein schmerzfreies und einfaches Entfernen des Verbandes ist möglich, ggf. durch Befeuchten des Verbandes bzw. der Komresse.

Sicherheitshinweise:

Nicht auf offenen Wunden verwenden.

Wechselwirkungen mit Salben sind nicht bekannt. Dennoch wird **von** einer gleichzeitigen Anwendung von arzneihaltigen Salben abgeraten, da eine erhöhte Resorption durch den Verband nicht ausgeschlossen wird. Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Phenoxyethanol) nicht verwenden.

Bei Auftreten von Juckreiz, anhaltender Hautrötung oder Blasenbildung sollte die Behandlung unterbrochen und der behandelnde Arzt konsultiert werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerungshinweise:

Aktimed derma relief⁺ sollte bei Temperaturen bis max. 35 °C gelagert werden.

Aktimed derma relief⁺ sollte liegend gelagert werden.

Zusammensetzung:

Gewebe: Zellwolle, Polyamid

Rezeptur: Zinkoxid, Wasser, Glycerin, Calciumalginat, Hydrokolloidgel, Cardiospermum in der Verdünnungsstufe 10⁻⁶, Phenoxyethanol

CE: Konform gemäß EU Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Produktion: Deutschland

Stand 07/2018

Aktimed GmbH, Theaterstrasse 18, D- 69117 Heidelberg