

Gebrauchsinformation Kühlender Kompressionsverband

Aktimed veins relief⁺ ist ein feuchter, kühlender, halbstarrer Kompressionsverband mit guter Lagenhaftung aus der Gruppe der Zinkleimverbände. Der Verband bleibt auch nach Abschwellen von Ödemen stabil. Die Rezeptur enthält u.a. ein Hydrokolloidgel in das Aesculus hippocastanum 10⁻⁸ eingelagert ist. Die physikalische / mechanische Hauptwirkung des Verbandes wird durch die Rezeptur unterstützt. Die Rezeptur ist frei von Fetten wie z. B. Vaseline, Paraffine und hypoallergen sowie latexfrei.

Aktimed veins relief⁺ kann als Kompressionsverband in der Phlebologie, Dermatologie und Lymphologie eingesetzt werden, z. B. bei:

- Ulcus cruris venosum
- Ödematöse Veränderungen des Gewebes
 - chronisch venöse Insuffizienz
 - Lymphödem
- Entzündliche Erkrankungen der Gefäße bzw. des Gewebes
 - Thrombophlebitis
 - Phlebothrombose
 - Varikophlebitis

Der Verband darf bei offenen Wunden nur in Kombination mit und über einer sterilen Wundauflage verwendet werden.

Anwendungshinweise:

Offene Wunden / Hautareale müssen zuerst mit einer sterilen Wundauflage abgedeckt werden.

Aktimed veins relief⁺ wird zirkulär gewickelt. Aufgrund des Wasseranteils hat die Binde einen angenehm kühlenden Effekt (Verdunstungskälte). Die günstigste Stabilität wird mit ca. 3 bis 4 Lagen erreicht. Über **Aktimed veins relief⁺** wird eine kohäsive Binde gewickelt, so dass eine Verschmutzung des Verbandes oder der Kleidung vermieden wird.

Der Verband trocknet innerhalb von ca. 4 bis 5 Stunden aus, bildet dann eine stabile, komprimierende Schale und kann bis zu 6 Tage angelegt bleiben.

Sicherheitshinweise:

Nicht auf offenen Wunden verwenden.

Bei arteriellen Verschlusskrankheiten, bei dekompensierter Herzinsuffizienz, septischer Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens sollte Aktimed veins relief⁺ nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingesetzt werden.

Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Phenoxyethanol) nicht verwenden.

Bei Auftreten von Juckreiz, anhaltender Hautrötung oder Blasenbildung sollte die Behandlung unterbrochen und der behandelnde Arzt konsultiert werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerungshinweise:

Aktimed veins relief⁺ sollte bei Temperaturen bis max. 35 °C gelagert werden

Aktimed veins relief⁺ sollte liegend gelagert werden

Zusammensetzung:

Gewebe: Zellwolle, Polyamid

Rezeptur: Zinkoxid, Wasser, Glycerin, Hydrokolloidgel, Aesculus hippocastanum in der Verdünnungsstufe 10⁻⁸, Phenoxyethanol, Dextrin

CE: Konform gemäß EU Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Produktion: Deutschland

Stand 07/2018

Aktimed GmbH, Theaterstrasse 18, D- 69117 Heidelberg